

RapidBac™ Vet

TEST FOR BACTERIA IN URINE



BE THE VET WITH THE ANSWERS.
NOT JUST THE ANSWER,
THE RIGHT ANSWER FOR VETS

- 소량의 소변을 이용하여 Bacteria를 측정하는 Strip 타입의 키트입니다.
- Flow immunoassay 방식으로 측정하여 정확한 결과를 제공합니다.

	Sensitivity	Specificity	Overall Accuracy	Reproducibility
RapidBac™ Vet for Canine *	97.4%	98.8%	98.5%	100%
RapidBac™ Vet for Feline **	90.9%	96.6%	96.0%	100%

- 선의 유무 확인 방식으로 간단하게 결과를 판독 할 수 있습니다.




- 검사 시간은 20분으로 신속하게 검사 결과 확인이 가능합니다.
- 실온보관이 가능합니다.
- Canine, Feline 검사가 가능합니다.




사용방법

1. 키트 파우치를 개봉한다.

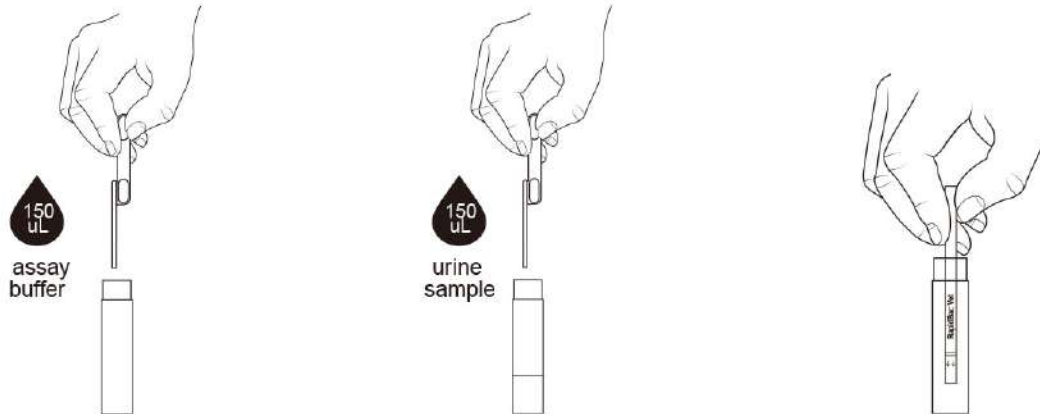


2. 개봉 후 파이펫을 이용하여 버퍼용액을 시험관에 2분 동안 두면서 한 번씩 잘 흔들어 준다.
3. 새로운 파이펫을 이용하여 소변 샘플을 버퍼 용액에 들어있는 시험관에 분주 후 잘 흔들어 준다.
4. 5분을 기다린다.
5. 검사 Strip을 시험관에 세워두고 10분을 기다린다.
6. 10분 후 Strip을 꺼내 결과를 판독한다.

결과해석

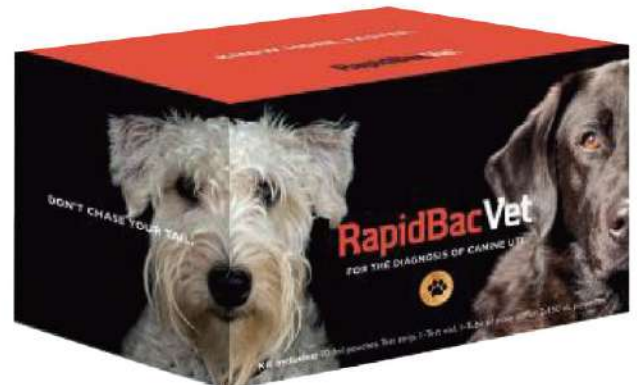

Positive Result 1번 2번에 선이 나타나는 경우.

1번과 2번 모두 선이 나타난 경우 Gram Negative.

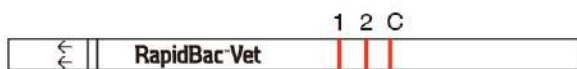

E. coli, Kelbsiella spp, Citrobacter spp, Enterobacter spp, and Serratiaspp.

2번에만 선이 나타난 경우 Gram Negative or Gram Positive.



Proteus spp, Morgenella spp, Providencia spp, Staphylococcus spp, Enterococcus spp, Actinomyces spp, and Actinobaculum spp.

Negative Result Control에만 선이 나타났을 경우.



Invalid Result Control에 선이 나타나지 않았을 경우.



수입판매원 : (주)더블유메디텍

서울시 금천구 두산로 70 현대지식산업센터 T-209-1호

TEL : (02) 2098-9983 FAX : (02) 2098-9984

홈페이지 : www.wmeditech.com

